

BOHRERSEQUENZEN

normaler / harter Knochen

Implantat	Pilotbohrer	Formbohrer	KDS
KOS 3.0	DOS 1	-----	KDS 3.0
KOS 3.2		DOS 2	KDS 3.2
KOS 3.7		DOS 3 (4)	KDS 3.7
KOS 4.1			KDS 4.1
KOS 5.0		DOS 5	KDS 5.0

In sehr hartem Knochen wird empfohlen, das Implantat etwas tiefer einzudrehen und anschliessend eine halbe Umdrehung heraus zu drehen.

weicher Knochen

Implantat	Pilotbohrer	Formbohrer	KDS
KOS 3.0	DOS 1	-----	-----
KOS 3.2		-----	KDS 3.0
KOS 3.7		DOS 2	KDS 3.2
KOS 4.1			KDS 3.7
KOS 5.0		DOS 3 (4)	KDS 4.1







BOHRERSEQUENZEN KOS PLUS IMPLANTATE

Implantat	Pilotbohrer, auch für die Penetration der 2. Kortikalis		Hinweis: DOS-Bohrer sollen bei diesem Arbeitsschritt nicht die 2. Kortikalis durchdringen
KOS PLUS 3.7	BCD1	Twist Drill 2.0 (Längen 21, 30 oder 40)	DOS 2
KOS PLUS 4.1	oder		DOS 3
KOS PLUS 5.0	BCDXI		DOS 3 - (DOS 5)

HEATLESS®-BOHRER «DOS» FÜR IMPLANTATE MIT KONISCHEM KERN



Chirurgischer Stahl, farbcodiert, tiefenmarkiert und resterilisierbar. Die Tiefenangaben sind auf dem Bohrer gelasert.

	Beschreibung	Farbe	max. Arbeitslänge	REF	Preiskat.
	DOS 1	gelb	16 mm	455311	D
	DOS 2	schwarz	16 mm	455312	D
	DOS 3	rot	13 mm	455313	D
	DOS 4	blau	20 mm	455314	D
	DOS 5	grün	13 mm	455315	D
	DOS 6	farblos	13 mm	455316	D

DOS 6: Dieser Bohrer ist an der Spitze um 2 mm kürzer. Deswegen kann im harten Knochen bis zu 2 mm tiefer gebohrt werden als nominal auf dem Bohrer angegeben ist. Für KOS 5.0 12, KOS 5.0 10, KOS 4.1 8. Dadurch wird die konische Knochenkavität nur im crestalen Bereich zirkulär erweitert, ohne dass die Bohrtiefe zunimmt.